


۷. در ادامه تصویر علامت سوال در زیر تصاویر شیر سمت راست و عکس نوزاد (مربوط به ترنسدیوسر) را لمس کنید تا این مرحله به پایان برسد.



۸. در صفحه بعد دکمه nCPAP را فشار دهید



۹. در این قسمت می‌توانید مد مورد نظر را انتخاب کنید و از دستگاه استفاده نمایید.

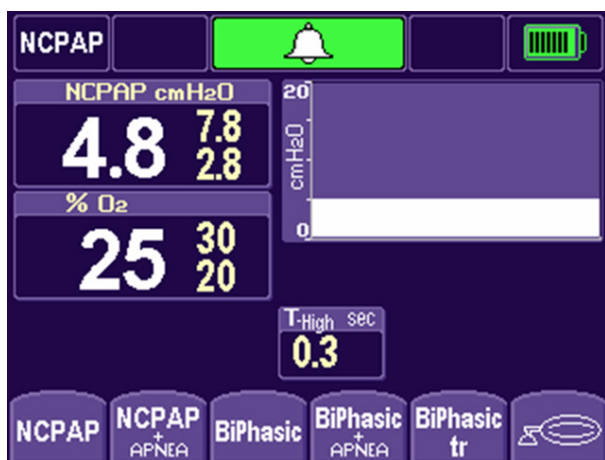


۱. پس از اتصال لوله خرطومی دستگاه، ماسک یا پراتنگ با سایز مناسب را به سر جنراتور وصل کنید. سپس با دست قسمت خروجی آن را مسدود نمایید.

۲. شیر سمت چپ (nCPAP) را روی 9 LPM و شیر سمت راست (High Flow) را بر روی 3 LPM تنظیم کنید.

۳. کابل مربوط به ترنسدیوسر را به محل مخصوص در قسمت جلوی دستگاه وصل کنید.

۴. دستگاه را با استفاده از دکمه ON/OFF که در قسمت پشت قرار دارد روشن کنید.

۵. پس از روشن شدن صفحه زیر مشاهده می‌شود که میزان nCPAP را حدود 5 CmH2O (با کمی درصد خطا) نشان می‌دهد. سپس در نمایشگر علامت سوال زیر شیر سمت چپ را لمس کنید.

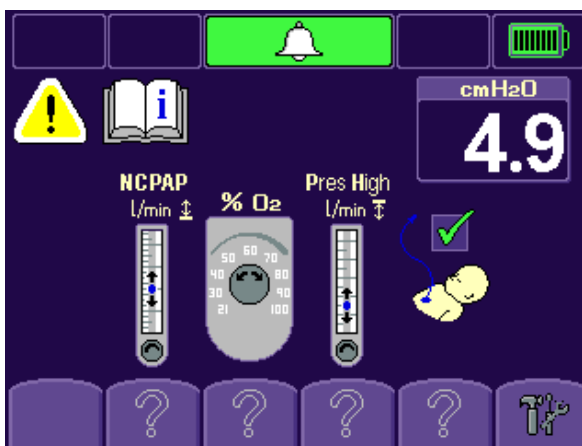


۶. سپس میزان درصد اکسیژن با توجه به تنظیم انجام شده با پیچ تنظیم بلند در قسمت جلوی دستگاه، نشان داده می‌شود. در نمایشگر، علامت سوال زیر تصویر نمادین درصد بلند را لمس کنید.





شرکت پارس تنفس
دستور العمل سریع کاربری
دستگاه SiPAP

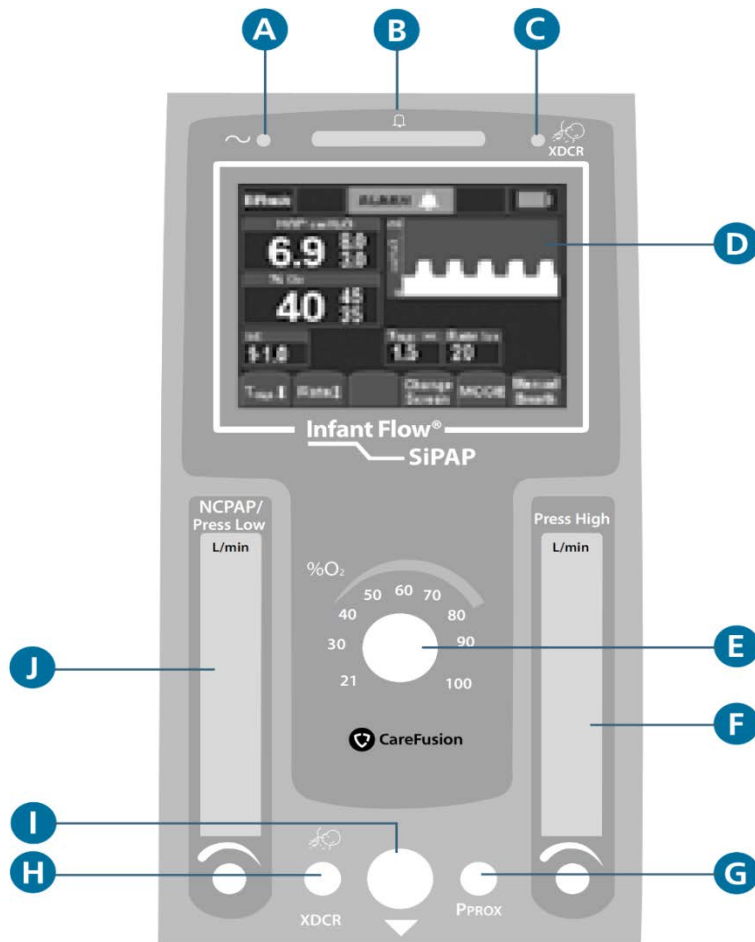

F : شیر سمت راست High Flow
G : محل اتصال لوله سنسور فشار
H : محل اتصال ترنسدیوسر سنسور شکمی
I : محل اتصال لوله خرطومی دستگاه
J : شیر سمت چپ nCPAP

A : چراغ نشان دهنده اتصال به برق
B : چراغ نشان دهنده آلارم
C : چراغ نشان دهنده عمل تنفس بر اساس ثبت از سنسور شکمی
D : نمایشگر
E : پیچ تنظیم بلندر دستگاه