

## دستورالعمل استفاده از دستگاه تخت احیاء مدل H-40101

- دمای مناسب برای محل نصب دستگاه بین 25 تا 30 درجه سانتیگراد می‌باشد. افزایش دمای بیش از 30 درجه یا کاهش بیش از حد دما، بر روی تنظیم حرارت دستگاه تأثیر خواهد گذاشت.
- دستگاه را در محلی قرار دهید که در مسیر جریان هوا نباشد.
- شاخه را به یک پریز نزدیک به دستگاه متصل کنید. پریز برق حتماً دارای سیم زمین باشد.
- در زمان کارکرد دستگاه، هد دستگاه بسیار گرم می‌باشد، لذا از دست زدن به آن و یا قراردادن وسیله بر روی آن جداً خودداری فرمایید.
- هیچگاه حسگر پوستی را خارج از محیط میز دستگاه قرار ندهید. حسگر دما را روی شکم نوزاد (در ناحیه کبد) قرار دهید و از چسب ضد حساسیت استفاده نمایید. از قرار دادن حسگر پوستی در مقعد نوزاد اجتناب کنید.
- با کلید ON/OFF دستگاه را روشن کرده و توسط کلیدهای ▲ ▼ دمای مناسب را تنظیم نمایید.
- در حالت عادی هنگام روشن شدن، دستگاه بصورت خودکار (Atuo) شروع به کار می‌کند.
- در حالت خودکار (Atuo) کنترل دما بوسیله حسگر پوستی انجام می‌شود.
- در حالت دستی (Manual) دما مطابق با درجه دمای تنظیم شده توسط کاربر، کنترل شده و نمایشگر سبزرنگ، دمای بدن نوزاد را (در صورتیکه حسگر به بدن نوزاد متصل باشد) نشان می‌دهد.
- دکمه SUCTION جهت روشن کردن ساکشن می‌باشد. با ولوم روی صفحه ساکشن می‌توانید قدرت ساکشن را تنظیم نمایید.
- دکمه LIGHT جهت روشن نمودن لامپ هالوژن می‌باشد.
- دکمه START/STOP جهت استفاده از آپگار تایمر می‌باشد. دکمه RESET جهت شروع به کار مجدد آپگار تایمر می‌باشد.
- برای تغییر زاویه تخت می‌توانید از اهرم تغییر زاویه درجهت ساعتگرد برای بالا بردن قسمت انتهایی تخت و خلاف ساعتگرد جهت افقی نمودن تخت نوزاد استفاده نمایید.
- جهت عکسبرداری از نوزاد، جهت قرارگیری دستگاه زیر دستگاه عکسبرداری، گرم‌کننده دستگاه را خاموش نموده سپس هد دستگاه را به آرامی به سمت چپ یا راست بچرخانید، سپس دیواره جلو تخت نوزاد را باز نموده، فیلم رادیولوژی را در محل خود (زیر سینی نوزاد) قرار داده و عکسبرداری را انجام دهید، پس از پایان کار، مجدداً هد دستگاه را بچرخانید تا در وضعیت اولیه قرار گیرد.
- جهت تنظیم ارتفاع تخت نوزاد متناسب با قد پرستار یا پزشک می‌توانید با فشردن کلیدهای تنظیم ارتفاع روی صفحه کلید، دستگاه را در ارتفاع مناسب تنظیم نمایید. ارتفاع تخت نوزاد از حدود 82 تا 96 سانتیمتر قابل تنظیم می‌باشد.
- در صورت نیاز نوزاد به اکسیژن می‌توانید از فلومتر دستگاه استفاده نمایید.
- به منظور جلوگیری از سقوط نوزاد توصیه می‌گردد چفت و بستهای لولای دیواره های کناری تخت بصورت مرتب مورد بازرسی قرار گیرد.
- از فشار آوردن با اجسام نوک‌تیز روی صفحه‌کلید (پنل) دستگاه اجتناب کنید.
- جهت نظافت دستگاه فقط از محلول دکنکس یا هایژن استفاده کنید.
- دستگاه باید هر 6 ماه یکبار توسط نمایندگان مجاز شرکت حامی نوزاد پارس سرویس و کالبره گردد.
- لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربری محصول رجوع کنید.
- هشدارهای دستگاه:
- A.S.D: اگر پس از تنظیم درجه حرارت در مدت نیم ساعت دمای ایجاد شده با دمای تنظیم شده دو درجه اختلاف داشته باشد هشدار A.S.D فعال می‌شود. در این حالت با فشار دادن دکمه Mute نیم ساعت دیگر به دستگاه جهت گرم کردن فرصت می‌دهد.
- SEN.F: اگر در مدار سنسور اختلالی بوجود آید یا دستگاه در حالت دستی (Manual) بکارگرفته شود، این هشدار هر 15 دقیقه فعال می‌گردد.
- Overheat: اگر دمای حس شده توسط سنسور پوستی بیش از 39/3 شود، این هشدار فعال می‌گردد.
- Power.F: اگر در حین کار دستگاه، برق اصلی دستگاه به هر دلیلی قطع گردد، آلام قطع برق فعال می‌شود.
- LO.B: در صورت اتمام طول عمر باتری 9 ولت کتابی غیرقابل شارژ دستگاه، آلام LO.B روی 7SEG قرمز پنل نمایش داده می‌شود.